



190 mm

140 mm


### Instalando seu SleepLive

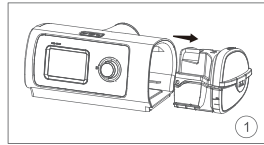


Coloque o equipamento em uma superfície plana e estável. Puxe o reservatório com cuidado, retirando-o do dispositivo.

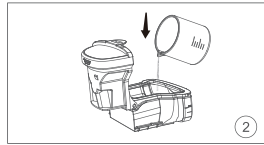


Abra o reservatório e encha-o com água destilada preferencialmente ou filtrada, até o limite máximo indicado. Não coloque água quente. Não deixe a água secar. **Aviso:** Troque a água do reservatório todos os dias.

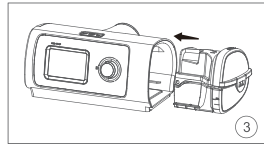


Feche o reservatório e insira-o na lateral do equipamento.

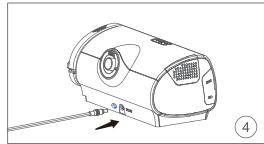

Conecte o cabo de alimentação na parte traseira do dispositivo.

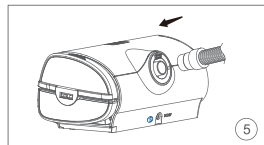

Conecte firmemente o tubo na saída de ar localizada na parte traseira do equipamento.

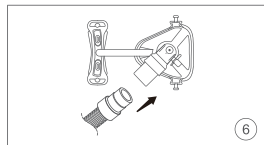


Conecte a outra ponta do tubo na máscara. Para mais informações, consulte as instruções de uso da máscara.



CPAP

## SleepLive

YH-480  
YH-480 4G  
YH-480 Wi-Fi

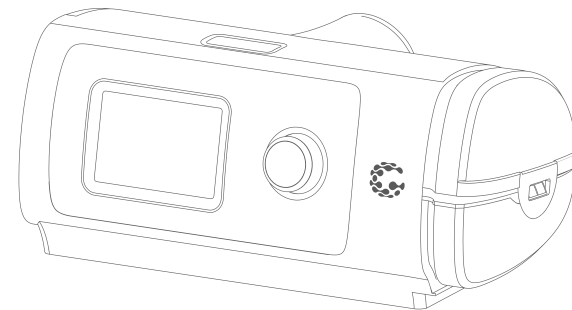

## Gaslive

G241112

Guia Rápido

95 mm

95 mm

190 mm

140 mm

**Atenção:**

- Não incline ou agite o dispositivo quando houver água no reservatório.
- Não encha demais o reservatório, pois a água pode entrar no tubo de ar e no dispositivo.
- Não transporte o dispositivo com o reservatório cheio de água.

**1. Iniciando a terapia**

1. Ligue o dispositivo na tomada.
2. Coloque a máscara.
3. Aperte o botão "START/STOP" (liga/desliga) para a saída do ar, ou respire normalmente se o "Smart Liga/Desliga" (liga/desliga inteligente)" estiver ativado.

**Notas:**

- Durante a terapia, a pressão [média] de tratamento em tempo real, a pressão definida, o tempo de rampa (min) e o nível de umidificação serão exibidos na tela.
- A tela apagará automaticamente após 1 minuto de terapia. Ao pressionar qualquer botão, a tela acenderá novamente.

**Atenção:** Verifique se o parâmetro clínico está de acordo com o definido pelo seu profissional de saúde.

**2. Parando a terapia**

1. Remova a máscara.
2. Aperte o botão "START/STOP" para parar a terapia. Se a função "Smart liga/desliga" estiver ativada, a terapia irá parar automaticamente após aproximadamente 8 segundos.
3. Para desligar o CPAP, tire a fonte e o cabo de energia da rede elétrica.

**3. Configurando o dispositivo**

**Atenção:** Os parâmetros clínicos devem ser configurados pelo profissional de saúde responsável que acompanha

seu tratamento. Alguns recursos de conforto podem ser ajustados pelo paciente, preferencialmente alinhados com seu profissional.

- 1- Ligue o dispositivo.
- 2- Gire o botão seletor para navegar pelo menu e pressione para selecionar a opção desejada.

**Informações:** É possível acessar os dados de terapia em tela selecionando "info".

**Configurações:** Em configurações, aperte o botão seletor para ver suas configurações atuais.

**Nota:** Para informação de todos os parâmetros ajustáveis e mais detalhes, consulte o manual completo.

**Rampa:** Tempo de rampa foi projetado para tornar mais confortável o início da terapia. É possível ajustar o tempo de rampa de 0 a 45 minutos. Durante o tempo de rampa, a pressão aumenta gradualmente até a pressão configurada ser alcançada. Para configurar a "Rampa", gire o botão seletor para ajustar a configuração e aperte o botão para salvar.

**Umidificação:** O umidificador foi projetado para umidificar o ar e tornar a terapia mais confortável. É possível definir o nível de umidificação entre 0 e 6, onde 0 significa desativar essa função, e 6 o nível mais alto.

Para ajustar o nível de umidificação, escolha o nível de umidificação girando o botão seletor e aperte o botão seletor para salvar.

**Notas:**

- O tempo de aquecimento é de 10 minutos.
- Se apresentar sensação de boca ou nariz secos, aumente o nível de umidade. Se houver gotas ou acúmulo de água em sua máscara ou no tubo de ar, diminua o nível de umidade.
- É possível alterar o nível de umidificação a qualquer momento durante sua terapia.

95 mm

95 mm