


190 mm

bend


### Instalando seu SleepLive 12 PRO

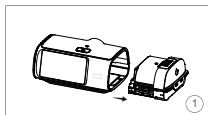


Coloque o dispositivo em uma superfície plana e estável. Pressione o botão do reservatório de água para removê-lo do dispositivo principal.




Abra o reservatório de água e adicione água destilada preferencialmente ou filtrada até o nível indicado. Não coloque água quente no reservatório. Não deixe a água secar. **Aviso:** Troque a água do reservatório todos os dias.

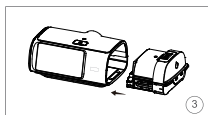

Feche o reservatório e insira-o na lateral do equipamento. Você ouvirá um som de clique quando o reservatório for instalado corretamente.

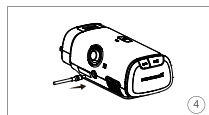

Conecte o cabo de alimentação na parte traseira do dispositivo.

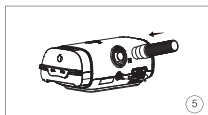

Conecte adequadamente o tubo de ar/tubo aquecido à saída de ar do dispositivo.



Conecte o tubo de ar/tubo aquecido à máscara. Para mais informações consulte as instruções de uso da máscara.

#### Notas:

- Não incline ou agite o dispositivo quando houver água no reservatório.
- Não encha demais o reservatório, pois a água pode entrar no tubo de ar e no dispositivo.


G24112



CPAP

## SleepLive 12 Pro

YH-690 4G

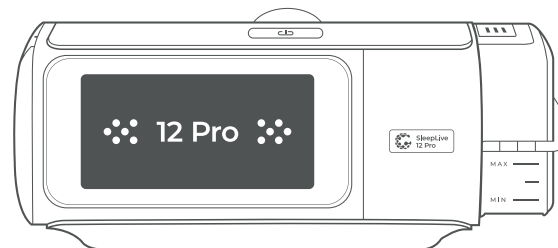

Gaslive

Guia Rápido

140 mm

bend

95 mm

95 mm

190 mm



bend

### 1. Iniciando a terapia

1. Ligue o dispositivo na tomada.
2. Coloque a máscara.
3. Aperte o botão START/STOP para iniciar a terapia, ou respire normalmente se o START/STOP Auto estiver ativado.

#### Notas:

- Durante a terapia, a pressão de tratamento em tempo real, a pressão inicial, o tempo de rampa e o nível de umidificação serão exibidos na tela.
- A tela apagará automaticamente após 2 minutos de terapia. Ao pressionar qualquer botão, a tela acenderá novamente.

**Atenção:** Verifique se o parâmetro clínico está de acordo com o definido pelo seu profissional de saúde responsável.

### 2. Parando a terapia

1. Retire a máscara.
2. Aperte o botão START/STOP (iniciar/parar) para parar a terapia, ou se o Smart Start/Stop (Início/parada inteligente) estiver ativado, a terapia irá parar automaticamente após 1 minuto.
3. Retire o cabo de energia da tomada para desligar o dispositivo.

### 3. Configurando o dispositivo

**Atenção:** O dispositivo deve ser configurado pelo profissional de saúde responsável. É possível realizar alguns ajustes de conforto no menu do paciente, preferencialmente sob alinhamento com o profissional que o acompanha.

**Relatório de sono:** Você pode monitorar a saúde do seu sono na página do relatório após uma terapia e ler o relatório resumido de 7 dias e 30 dias após um período de terapia.

**Nota:** Para mais detalhes sobre as informações e parâmetros exibidos no relatório, consulte o manual completo.

**Rampa:** Tempo de rampa foi projetado para tornar mais confortável o início da terapia. É possível ajustar o tempo

de rampa de 0 a 45 minutos. Durante o tempo de rampa, a pressão aumenta gradualmente até a pressão configurada ser alcançada.

Para ajustar o tempo de rampa, siga os seguintes passos: Toque em "Rampa" para entrar na página de configurações; Toque na quantidade de minutos de rampa desejado; Toque em "OK" para salvar sua alteração.

**Umidade:** O umidificador foi projetado para umidificar o ar e tornar a terapia mais confortável. É possível definir o nível de umidificação entre 0 e 6, onde 0 significa desativar essa função, e 6 o nível mais alto.

Para ajustar o nível de umidificação, siga os seguintes passos: Toque em "Umidade" para entrar na página de configurações; Toque no nível de umidificação desejado; Toque em "OK" para salvar sua alteração.

#### Notas:

- O tempo de aquecimento é de 10 minutos.
- Se apresentar sensação de boca ou nariz secos, aumente o nível de umidade. Se houver gotas ou acúmulo de água em sua máscara ou no tubo de ar, diminua o nível de umidade.
- Você pode alterar o nível de umidificação a qualquer momento durante sua terapia.

**Teste máscara:** A função de teste da máscara pode ajudá-lo a avaliar se a máscara está adaptada corretamente e se não há vazamentos de ar.

Toque em "Teste de máscara" para entrar. Coloque a máscara de acordo com o guia de uso da máscara. Toque em "Iniciar teste" e o dispositivo se ajustará de acordo com suas condições respiratórias, ajudando a determinar se há vazamento de ar ao usar a máscara. Após a conclusão do teste da máscara, se for indicado que a máscara apresenta vazamentos, coloque a máscara novamente de acordo com o guia de utilização da máscara e refaça o teste.

**Nota:** Para informação de todos os parâmetros ajustáveis e mais detalhes, consulte o manual completo.

bend



95 mm

95 mm

140 mm

