

190 mm

bend

Instalando seu SleepLive LT


G241112



CPAP

SleepLive LT

YH-550
YH-550 4G
YH-550 Wi-Fi

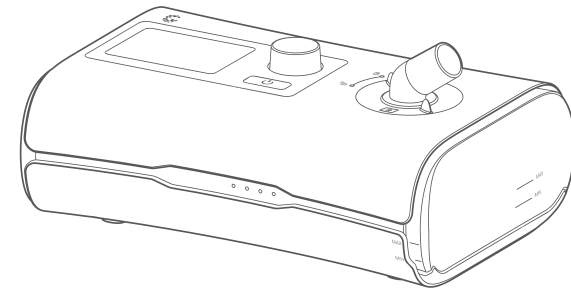

Gaslive


Guia Rápido




Coloque o dispositivo em uma superfície plana e estável. Gire a tampa do umidificador de 90° para cima.




Puxe a tampa do umidificador, removendo-o do dispositivo.

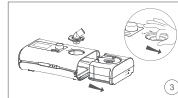


Pressione o reservatório de água suavemente e puxe-o para fora do dispositivo.

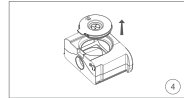


Abra a tampa do reservatório de água.

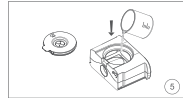


Encha o reservatório de água destilada preferencialmente ou filtrada, até o limite máximo indicado. Não coloque água quente no reservatório. Não deixe a água secar. **Aviso:** Troque a água do reservatório todos os dias.

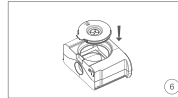


Feche a tampa do reservatório de água.

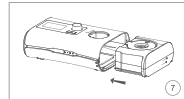


Insira o reservatório de água na lateral do dispositivo.

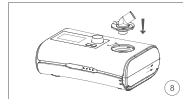


Feche a tampa do umidificador.

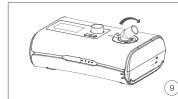


Gire a tampa do umidificador de 90° para cima.

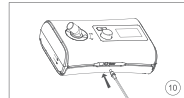

Conecte o cabo de alimentação na parte traseira do dispositivo.

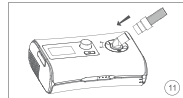

Conecte o tubo de ar firmemente à saída de ar localizada na parte superior do dispositivo.

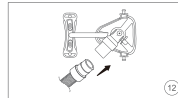

Conecte a extremidade livre do tubo de ar firmemente na máscara. Para mais informações consulte as instruções de uso da máscara.

Atenção: Não encha demais o reservatório de água, pois a água pode entrar no tubo de ar e no dispositivo. Não incline ou agite o dispositivo quando houver água no reservatório. Não transporte o dispositivo com o reservatório cheio de água.

bend

95 mm

95 mm

140 mm

190 mm

bend

1. Iniciando a terapia

1. Ligue o dispositivo na tomada.
2. Coloque a máscara.
3. Aperte o botão "START/STOP" (iniciar/parar) para ligar, ou respire normalmente se o "Smart Start/Stop" (início/parada inteligente) estiver ativado.

Notas:

- Durante a terapia, a pressão de tratamento em tempo real, a pressão definida, o tempo de rampa (min) e o nível de umidificação serão exibidos na tela.
- A tela apagará automaticamente após 2 minutos de terapia. Ao pressionar qualquer botão, ela acenderá novamente.

Atenção: Verifique se o parâmetro clínico está de acordo com o definido pelo profissional de saúde que o acompanha.

2. Parando a terapia

1. Retire a máscara.
2. Aperte o botão "START/STOP" para parar a terapia, ou se o "Smart Start/Stop" estiver ativado, a terapia irá parar automaticamente após 1 minuto.
3. Retire o cabo de energia da tomada para desligar o dispositivo.

3. Configurando o dispositivo

Atenção: O dispositivo deve ser configurado pelo profissional de saúde responsável. É possível realizar alguns ajustes de conforto no menu do paciente, preferencialmente sob alinhamento com o profissional que o acompanha.

1. Ligue o dispositivo.
2. Gire o botão seletor para navegar pelo menu e pressione para selecionar a opção desejada.

Informações: É possível acessar os dados de terapia em tela selecionando "info".

Configurações: Em configurações, aperte o botão seletor para ver as configurações atuais.

Nota: Para informação de todos os parâmetros ajustáveis e mais detalhes, consulte o manual completo.

Rampa: Tempo de rampa foi projetado para tornar mais confortável o início da terapia. É possível ajustar o tempo de rampa de 0 a 45 minutos. Durante o tempo de rampa, a pressão aumenta gradualmente até a pressão configurada ser alcançada. Para configurar a "rampa", gire o botão seletor para ajustar sua configuração e aperte o botão para salvar.

Umidificação: O umidificador foi projetado para umidificar o ar e tornar a terapia mais confortável. É possível definir o nível de umidificação entre 0 e 6, onde 0 significa desativar essa função, e 6 o nível mais alto.

Para ajustar o nível de umidificação, escolha o nível de umidificação girando o botão seletor e aperte o botão seletor para salvar.

Notas:

- O tempo de aquecimento é de 10 minutos.
- Se apresentar sensação de boca ou nariz secos, aumente o nível de umidade. Se houver gotas ou acúmulo de água em sua máscara ou no tubo de ar, diminua o nível de umidade.
- Você pode alterar o nível de umidificação a qualquer momento durante a sua terapia.

bend

95 mm

95 mm

140 mm